

3M Science.
Applied to Life.™

Trial Campaign



リライエックス™ ユニバーサルレジンセメント

トライアル
キャンペーン

キャンペーン期間

2022 10/21 FRI - 12/29 THU

リライエックス™ ユニバーサルレジンセメントは、おかげさまで発売から2年目を迎えました。初めてお使いになる方にお試しいただきやすいキャンペーン品をご用意しました。この機会にぜひお試しください。

リライエックス™
ユニバーサルレジンセメント



+



×20本

スコッチボンド™
ユニバーサル プラス アドヒーズブ
ユニドースタイプ

さらに
→

リライエックス™
ユニバーサルレジンセメント
スタートガイド



術式やシリンジ・チップの使用方法に加え、よくあるご質問をまとめました。製品をお使いになる前にぜひご一読ください。



キャンペーン内容

- シリンジ(3.4g)×1本
- スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプ×20本
- マイクロミキシングチップ×20本
- リライエックス™ ユニバーサルレジンセメント スタートガイド×1冊
- エンド用延長チップ×5本


製品番号

- 56971MS (トランスルーセント)
- 56973MS (A3 オペーク)
- 56972MS (A1 ユニバーサル)
- 56974MS (ホワイトオペーク)

キャンペーン
希望医院価格

14,000円

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントを
購入された先生方が
「特に気に入った点」
をご紹介します。

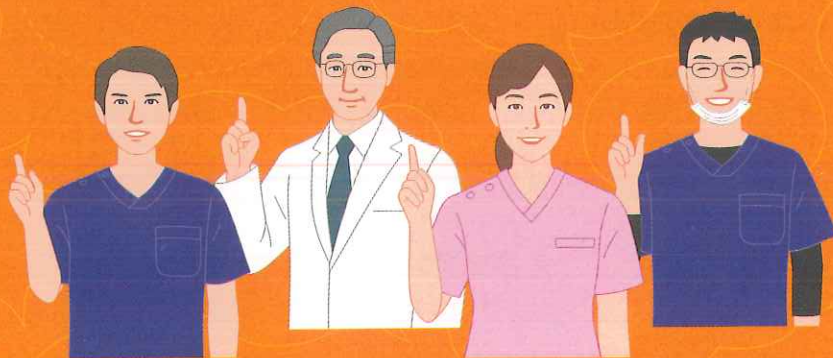

前処理材の種類が 少ない



1 VMSテクノロジー

支台歯側も補綴物側も前処理材はスコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブのみ! 3M独自の「VMSテクノロジー」採用のスコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは歯質・各種材料に接着可能です。




余剰セメントの除去が しやすい



2 除去しやすい硬化性状

重合開始剤のバランスを最適化したことで、2~3秒の光照射でも固まりすぎず、一塊での除去が可能になりました。

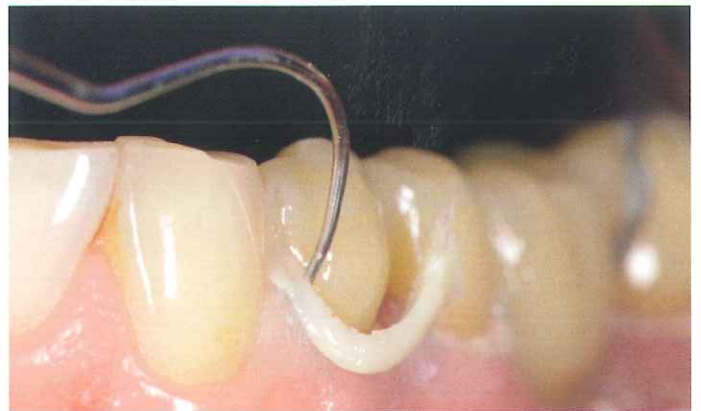

(42%の方が実感)

チップに残るペースト が少ない



3 独自のチップ構造

新開発のマイクロミキシングチップにより、使用後のチップに残るペースト量を従来品※と比べて80%削減しました。

※リライエックス™ アルティメット レジンセメント



使用後はチップを 外した状態で 衛生的に保管可能



4 セルフシーリング

ミキシングチップを取り外すとシリンジ先端に内蔵されている弁が閉じる設計を実現しました。これにより、使用後のミキシングチップはすぐに破棄可能で、シリンジを衛生的に保管できます。

チップを外した状態

チップをつけた状態



内蔵の弁が閉じている



内蔵の弁が開き、ペーストを吐出可能

※ミキシングチップをつけたまま保管すると、硬化による詰まりの原因となりますのでご注意ください。

(42%の方が実感)

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズは
 リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントの前処理材としてだけでなく、
 多用途にお使いいただけます。



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズ ユニドースタイプの正しい使い方

ブラシ
 混和血
 ボンディング材
 収納部

STEP 1 丸い部分を押しつぶします

中でボンディング材が移動

プチッ

STEP 2 ブラシを引き抜いてすぐ使えます

ボンディング材はこの部分に溜まるので混和血が不要です

適量がブラシにつきます
 (細かい処理に適したXSブラシ)

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントを既にお使いの方はこちら!

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント ダブルパック (同色2本入り)

内容	・シリンジ(3.4g)×2本	製品番号	56971W (トランスルーセント)
	・マイクロキシングチップ×40本		56972W (A1 ユニバーサル)
	・エンド用延長チップ×10本		56973W (A3 オペーク)

1本で購入するより
10% OFF

希望医院価格 **25,200円**

販売名: スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズ 認証番号: 302AKBZX00043000 / 販売名: リライエックス ユニバーサル レジン セメント 認証番号: 302AKBZX00044000
 販売名: リライエックス アルティメット レジン セメント 認証番号: 225AKBZX00136000

スリーエム ジャパン株式会社 歯科用製品事業部 [Web 3M 歯科](https://www.3mcompany.jp/dental) <https://www.3mcompany.jp/dental>

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2022年9月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
 ※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 ※ご使用前に、製品の添付文書を必ずご覧ください。

3M、リライエックス、スコッチボンド、Vitrebondは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2022. All Rights Reserved. DEN-1774-AJ (092280) PN/e.

3M コールセンター
 ☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)