

ジェルタイプの知覚過敏抑制材料 **健保適用**

MSコート Hysブロックジェル トリプルパックキャンペーン

2022年 11月21日 (mon) ~ 12月20日 (tue)

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを含めまして、「MSコート Hysブロックジェルトリプルパックキャンペーン」を企画いたしました。期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

使いやすい
シリンジ

ジェルタイプの知覚過敏抑制材料

ダイレクト塗布

シリンジから
そのまま塗布可能

こすり塗り不要

ジェルを歯面に30秒間
静置するだけ

歯面にとどまりやすい

ジェルタイプなので垂れずにとどまる

フレンジが大きく
指を掛けやすい

ジェルの
残量が見える



不安を和らげる
ポップなデザイン

MSコート Hysブロック® ジェル

MSコート Hysブロックジェル…………… 1本(3mL)
プラスチックニードル…………… 10本(ニードルキャップ(グレー) 1個付き)
標準価格 7,600円 204610726

お得な増量パック!

キャンペーン
限定パック

MSコート Hysブロック®ジェル トリプルパック

MSコート Hysブロックジェル…………… 1本(3mL)×3
プラスチックニードル…………… 30本(ニードルキャップ(グレー) 3個付き)
標準価格 19,800円 204610740

特別価格にてご提供!

Features01

MSコートシリーズの実績を継承

高い知覚過敏抑制効果

MSポリマー しゅう酸 カリウム塩

MSコート HysブロックジェルはMSコートシリーズの高い知覚過敏抑制効果の継承に加え、カリウム塩を配合しました。ナノサイズのMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、フッ化物とカリウム塩を含んだ保護被膜を形成します。さらに、ジェルタイプになったことで歯面にとどまりやすく、象牙細管を緊密に封鎖します。

象牙細管

エナメル質
象牙質
歯髄
象牙細管
外来刺激
短く鋭い痛み

象牙細管
MSコート Hysブロックジェル適用後

適用後の象牙質断面 (塗布30秒後)

カルシウムと反応し、形成された保護被膜が象牙細管を緊密に封鎖します。

神経線維周辺のカリウムイオンの増加が神経伝達の阻害に有効であることが報告されています*。

象牙質断面イメージ図

*Kim S. Hypersensitive teeth: desensitization of pulpal sensory nerves; J Endod 12, 482-485, 1996
†Peacock JM, Orchardson R. Effects of potassium ions on action potential conduction in A- and C-fibers of rat spinal nerves; J Dent Res 74, 634-641, 1995.


Features02

フッ化ナトリウムによるMSポリマー被膜の耐酸性効果

フッ化ナトリウム


フッ化ナトリウムによりMSポリマー被膜の耐酸性がさらに向上します。それにより適用歯面の酸による脱灰を抑制します。

●コーラ飲料に10分浸漬後の適用歯面

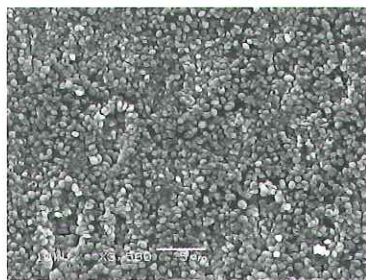

MSポリマー被膜の残存を確認

象牙質に対するフッ素の深さ方向への取り込み量

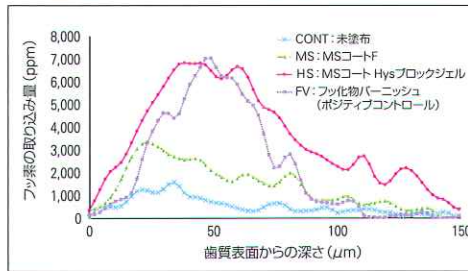

すべての材料でフッ素を取り込む傾向を示すことが明らかとなった。さらに、MSコート Hysブロックジェルは深部へフッ素を供給することが明らかとなった。

松田康裕ほか：フッ化物含有知覚過敏抑制材による象牙質表面の脱灰抑制効果
日歯保存誌60(6)：273~281, 2017

Features03

ホワイトニング時の知覚過敏抑制効果

ホワイトニング後の知覚過敏抑制にも高い効果が期待できます。


ホワイトニング前に塗布しても漂白効果を阻害しません。



ホワイトニング後のマイクロクラック



MSコート Hysブロックジェルにより封鎖を確認

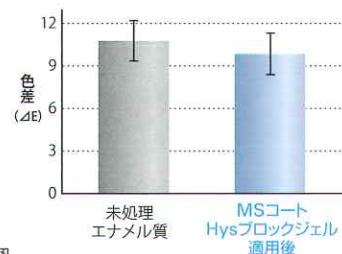

MSコート Hysブロックジェル適用後でも未処理エナメル質と同等の漂白効果が確認できる。

※サンメディカル社測定データ

製品の詳細ページもぜひご覧ください。



商品名	品目コード	標準価格	キャンペーン価格	ご注文数
MSコート Hysブロックジェル	204610726	7,600円	特別価格	
MSコート Hysブロックジェルトリプルパック	204610740	19,800円		

製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
＜歯科医療従事者様専用＞

www.dental-plaza.com