

## フロークリーナー + オロカップ

キャンペーン



3,000セット限定

酸性



スタート 2022年9月21日(水)～

### MD555(フロークリーナー)とは?

吸引システムとユニット内の配管や分離器の洗浄に使用します。歯面清掃やパウダーやペースト、配管内の沈着物、固着物に効果を発揮しつまりを防止します。



### オロカップとは?

MD555フロークリーナーの希釈液を一度に2台分(2L)作製しバキュームホース内のお手入れがお手軽にできる専用容器です。差し込み口の特殊構造により、容器内の希釈液と空気を混ぜながら吸引できるため、洗浄効果がさらに高まります。



バイオクリーンボウル

**使用方法** 週1回フロークリーナーのご使用で配管内の徹底洗浄をお勧めします。

※バイオクリーンは、フロークリーナー使用後4時間以上あけてご使用ください。 ※強力洗浄液のため下記の使い方に従ってお使いください。

### Step 1 下洗いの水吸引



より高い効果を得るため、洗浄作業前に各ユニットで2ℓの水を吸引させます。

### Step 2 希釈液を作製



オロカップのキャップを外して、水と濃縮液を入れます。キャップを戻し、オロカップを左右に少し振って混ぜてください。

### ●希釈液の作り方

	水	濃縮液
1台	1L	2½杯
2台	2L	5杯

### Step 3 希釈液を吸引



バキュームと排唾管のハンドピースをオロカップに差し込み、各ユニットに希釈液1ℓずつを吸引させます。

### Step 4 注入



スピットン下の配管には希釈液を作製し250ml以上流してください。

### Step 5 作用時間



酸性薬液のため30分～120分以内に必ずSTEP6を行ってください。

### Step 6 仕上の水吸引



ユニット1台につき水2ℓを吸引させてください。スピットンボウル下の配管にも水を1ℓ以上流してください。

限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。キャンペーンの詳細・価格はお取引歯科ディーラー様までお問い合わせください。

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

MD555フロークリーナー1L+オロカップ キャンペーン	
貴病院名	
ご住所	
TEL	FAX

コードNo.	商品名	価格	注文数
457675	MD555 (フロークリーナー)1L +オロカップ	¥	

■お取引ディーラー名