

# トレー清掃が楽々簡単!

アルギン酸塩印象材専用清掃材

ニシカトリーナー 剥離タイプ

# よくとれ~る セール

2023年 3/24 → 4/14

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
 このたびはアルギン酸塩印象材専用清掃材「ニシカトリーナー よくとれ~る」  
 の期間・数量限定セールを実施いたします。  
 日頃ご愛顧いただいている歯科医院様、またご採用を検討中の歯科医院  
 様もぜひこの機会をご利用ください。

そのまま漬けて

はがすだけ!



【期間限定・数量限定】  
 標準価格:7,200円を

**特別価格**  
 にてご提供!!

〈包装〉1340mL  
 実用液 4L分

 日本歯科薬品株式会社

● 販売店名 \_\_\_\_\_

本社 山口県下関市西入江町2-5 〒750-0015 TEL 083-222-2221(代) FAX 083-222-2220  
 大阪営業所 大阪市中央区道修町2-6-6 〒541-0045 TEL 06-6222-4090(代) FAX 06-6222-3950  
 東京営業所 東京都台東区柳橋1-23-4 〒111-0052 TEL 03-5822-5350(代) FAX 03-5822-5351  
 福岡営業所 福岡市南区大橋1-1-17-403 〒815-0033 TEL 092-559-1621(代) FAX 092-559-1622

お問い合わせ・資料請求は お客様窓口 ☎0120-8020-96 [ホームページ] <https://www.nishika.co.jp/>


# ニソトレクリーナーよくとれ〜るの特長

## 1. トレー清掃が楽々簡単




※ 本品は水で3倍に希釈して使用します。(ペースト状アルギン酸塩印象材「トクソー AP-1」ご使用の場合は2倍に希釈)

### 浸漬時間を大幅に短縮

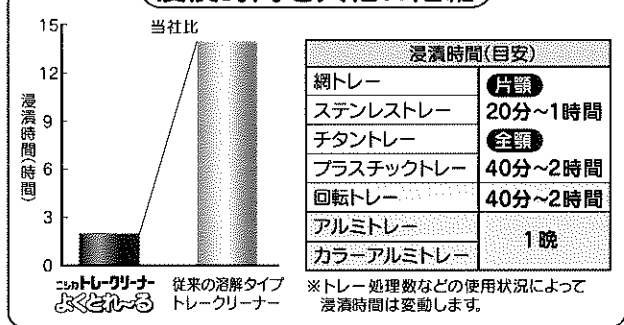

### 液を捨てた後、バケツがきれいです。

印象材の残渣が、バケツの底に沈殿しません。

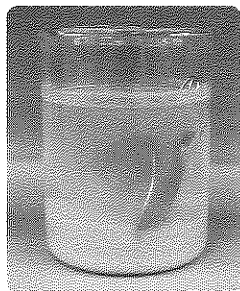


ニソトレクリーナーよくとれ〜る

当社比

従来の溶解タイプ  
トレークリーナー

## 2. トレーが長持ち

- トレーに無理な力をかけずに済みます。
- 防錆剤配合によりネットレー等がサビません。

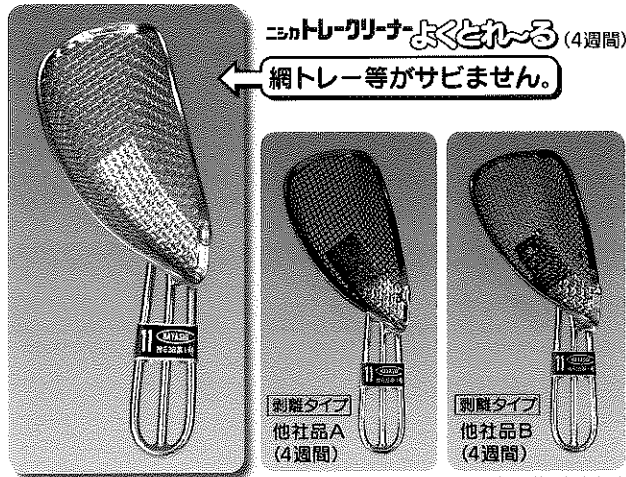

日本歯科薬品株式会社研究所データ

(各種印象用トレーをよくとれ〜るに2週間浸漬したときの外観変化)

トレー製品名(メーカー)	外観変化
ハヤシネットレー(林歯科商店)	○ 変化なし
YSネットレー(YDM)	○ 変化なし
OU トレー(コマツ)	○~△ わずかに白変
エイブ印象用トレー(東京歯材社)	○ 変化なし
カラートレー(YDM)	○ 変化なし

日本歯科薬品株式会社研究所データ

◆ スズ合金などのリムロックトレーは、黒く変色することがあるため、ご使用は避けてください。

## 3. すぐれた除菌力


実践臨床において2週間連続使用しても除菌効果が維持されます。

使用後2週間目の液

〔よくとれ〜る使用済み液を用いた〕  
一般細菌数測定結果

対象	使用後2週間目の液
歯科医院A	一般細菌は検出されなかった
歯科医院B	一般細菌は検出されなかった

日本歯科薬品株式会社研究所データ

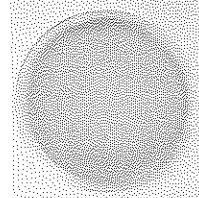

一般細菌は検出されず

### 手肌にやさしい

ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験の結果、**無刺激性**であることが確認されています(日本食品分析センター試験)。

### 環境に配慮

使用済み液は、微生物等により速やかに分解されるため、一般排水として廃棄できます。

ゴミ削減のため、折りたんで小さくできるボトルを採用しています。



使用上の注意は製品ボトルに記載されている内容をご覧ください。