



ビューティシーラント & PRG バリアコート

# 患者さまPRプロジェクト 2023

【期間】 2023年 5月22日月 ~ 6月20日火

対象製品をご購入いただいた方には**はいくオリジナル**歯の知育絵本(非売品)と一緒にご提供いたします。

※当キャンペーンは数量限定です。期間中でも数量に達し次第、終了させていただきます。

歯科小窩裂溝封鎖材  
ビューティシーラント セット ¥8,000



3WAY 歯面コーティング材  
PRG バリアコート セット ¥10,000



一緒に  
ご提供します

+

はいく  
「わくわく 歯医者さん！」

歯医者さんは怖いところではなく楽しいところ  
というイメージを育む絵本です。

+

「トゥース・フェアリーは ごきげんななめ」

生えかわり時期のケアの大切さについて  
学んでいただける絵本です。



おすすめのケアとして  
「シーラント処置」も  
ご紹介



監修:岡崎好秀先生 A5版 ※絵本の選択はできません

はいく webで読む歯の絵本  
8iku.com

「はいく」は、子供と保護者が一緒に絵本を読み、  
親子で歯に対する知識を深めていただくことを目的に  
歯科医師が監修の元に運営している歯の知育サイトです。  
歯科治療・予防を身近に感じてみてください。



はいく公式 Instagram ご案内

@888iku

歯への理解を深められる  
コンテンツを中心に投稿しています。  
是非フォローをお願いいたします!



# ビューティシーラント

保険適用品 (小児)

セルフエッチングプライマーを使用した歯質に優しいシーラントシステム



写真提供: 貞光歯科医院 貞光 謙一郎 先生

水洗不要の簡単ステップ



プライマー  
塗布 5秒  
放置 5秒



弱圧でエア乾燥



ペースト  
填塞 5秒



光照射  
LED 10秒  
(ハロゲン 20秒)


歯面コーティング材(歯科用知覚過敏抑制材料)(高分子系歯科小窩裂溝封鎖材)

# PRGバリアコート

3つの用途で使える歯面コーティング材

適用例 ① 知覚過敏抑制材として [保険適用品]

水を利用したガラスイオノマー反応により歯面と接着するため、防湿が困難な部位へのシーラントにおすすめです。

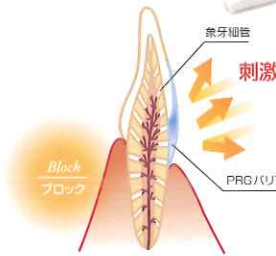

※イメージ

外來刺激を強固にブロック

薄いコーティング層が象牙細管を封鎖し外部からの刺激をブロックします。

適用例 ② シーラント材として [保険適用品] (小児)

萌出直後のラバーダム防湿ができない乳歯・幼若永久歯のシーラントに



写真提供: 東北大学 福本 敏 先生

適用例 ③ 歯面コーティング材として

●う蝕感受性の高い部位に

●ブラッシングがしづらい部位に



ホワイトスポットが認められ、再石灰化が必要な症例

写真提供: 東北大学 福本 敏 先生



ブラケット装着の影響により、白斑が生じた歯質

写真提供: おかもと矯正歯科クリニック 岡本 亨 先生


ビューティシーラント、PRGバリアコートはS-PRGフィラーを含有した製品です。

Giomer サイト  
<https://www.giomer.jp/>




S-PRG  
フィラーの  
はたらき

■ フッ素をはじめとする6種類のイオンを徐放

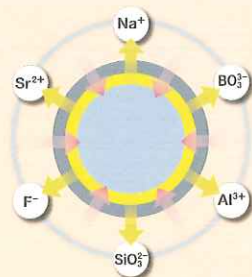

■ フッ素をリリース&リチャージ

フッ素含有のハミガキやジェルを使用することでフッ素をリチャージします。

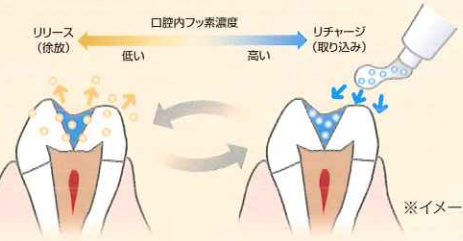

※イメージ

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2023年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。