

3M Science.
Applied to Life.™

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント

トライアルキャンペーン

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントは、おかげさまで発売から3年目を迎えました。まだお使いでない方にお試しいただきやすいキャンペーン品をご用意しましたので、この機会にぜひご購入ください。

キャンペーン期間

2023 5/22 MON - 7/31 MON

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプ × 10本



関連情報への二次元コードつきで、簡単にアクセス可能!



3M Science.
Applied to Life.™
リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント
スタートガイド

<p>準備物</p> <ul style="list-style-type: none"> リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ リライエックス™ ユニバーサル エンド用延長チップ リライエックス™ ユニバーサル ミクロミキシングチップ 	<p>チップの装着方法</p> <p>ミキシングチップの装着方法</p> <p>エンド用延長チップの装着方法</p> <p>“カチッ”</p>	<p>使用後の保管方法</p> <p>未使用のミキシングチップは、保管時を正しく取り出し、保管します。取り出すときに必ず、先端の樹脂を拭き取ります。</p> <p>ミキシングチップを取り外して製品を保管すること</p> <p>ミキシングチップをつけたまま保管すると、硬化による柱状の割傷が多くなりますのでご注意ください。</p>	<p>製品ガイド (PDF)</p> <p>チップの装着方法 (動画)</p>										
<p>簡略術式 (アドヒーズブモードの場合)</p> <table border="1"> <tr> <td>1 塗布</td> <td>2 エアージェット</td> <td>3 セメント填入</td> <td>4 余剰セメント除去</td> <td>5 最終硬化</td> </tr> <tr> <td>20秒</td> <td>5秒</td> <td>2-3秒</td> <td>10秒</td> <td>6分</td> </tr> </table> <p>注: 2-3秒は各面、10秒は各面、3分は総和後、6分は総和後</p>			1 塗布	2 エアージェット	3 セメント填入	4 余剰セメント除去	5 最終硬化	20秒	5秒	2-3秒	10秒	6分	<p>＋α情報</p> <p>① チップの取り出し (PDF)</p> <p>② 簡略術式 (PDF)</p> <p>③ 最終セメント除去 (動画)</p>
1 塗布	2 エアージェット	3 セメント填入	4 余剰セメント除去	5 最終硬化									
20秒	5秒	2-3秒	10秒	6分									

スタートガイド

術式やシリンジ・チップの使用方法に加え、よくあるご質問をまとめました。製品をお使いになる前にぜひご一読ください。



キャンペーン内容

- ・シリンジ(3.4g) × 1本
- ・スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプ × 10本
- ・マイクロミキシングチップ × 20本
- ・リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント スタートガイド × 1冊
- ・エンド用延長チップ × 5本



製品番号

- 56971MS (トランスルーセント)
- 56973MS (A3 オペーク)
- 56972MS (A1 ユニバーサル)
- 56974MS (ホワイトオペーク)

キャンペーン
希望医院価格

14,000円

材料はこの2つだけ!

リライエックス™ ユニバーサル レジンセメント

- ✓ 余剰セメントの除去が容易
- ✓ 新シリンジデザイン&
マイクロミキシングチップ
- ✓ 高い接着力^{*1}
- ✓ シンプルな術式
- ✓ 審美性の高い症例にも対応

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ

- ✓ 1本で多用途
- ✓ シランカップリング剤含有
- ✓ 象牙質と同等のX線造影性
- ✓ 優れたぬれ性と歯質浸透性^{*2}
- ✓ 使用可能時間 30分(遮光下)



※1. 当社従来品 リライエックス™ アルティメットレジンセメントと比較して
 ※2. 当社従来品 スコッチボンド™ ユニバーサルアドヒーズブと比較して

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプの正しい使い方



STEP 1 丸い部分を押しつぶします

中でボンディング材が移動



STEP 2 ブラシを引き抜いてすぐ使えます

ボンディング材はこの部分に溜まるので混和皿が不要です



リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントを既にお使いの方はこちら!



リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント ダブルパック (同色2本入り)

- 内容
- ・シリンジ(3.4g)×2本
 - ・マイクロミキシングチップ×40本
 - ・エンド用延長チップ×10本

- 製品番号
- 56971W (トランスルーセント)
 - 56972W (A1 ユニバーサル)
 - 56973W (A3 オペーク)

希望医院価格

25,200円

1本で購入するより
10% OFF

販売名: スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ 認証番号: 302AKBZX00043000 / 販売名: リライエックス ユニバーサル レジン セメント 認証番号: 302AKBZX00044000
 販売名: スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ 認証番号: 224AKBZX00054000 / 販売名: リライエックス アルティメット レジン セメント 認証番号: 225AKBZX00136000

スリーエム ジャパン株式会社 歯科用製品事業部 Web 3M 歯科 Q https://www.3mcompany.jp/dental

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2023年4月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
 ※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 ※ご使用前に、製品の電子添文を必ずご覧ください。

3M、リライエックス、スコッチボンドは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2023. All Rights Reserved. DEN-1819-AJ (042380) PN/e.

3M コールセンター
0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)