



光重合型矯正用接着材

ビューティオーソ ボンドII

Official partner



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry



夏期 お買い得キャンペーン

キャンペーン期間：2023年5月22日(月)～2023年7月20日(木)

リン酸エッチングが不要の **一液タイプ** セルフエッチングプライマーと、マルチイオンリリース能を有した「S-PRGフィラー」配合の光重合型ペーストからなる新世代の矯正用接着材です。

プライマー性状を改良しテクニカルエラーが起こりにくくなりました。30秒放置→水洗・乾燥の必要なリン酸エッチング(インパーバボンド エッチングゲル)よりもスピーディな**10秒放置→エアブロー**で処理完了です。

フロアブルペーストは、**目立ちにくい歯冠色**と**視認性に優れた青色**の2シェードをご用意

<使用例>

リンガルリテーナー

236106 フロアブルペースト ブルー
松風ニードルチップ5入



標準医院価格

¥4,000

特別標準医院価格

→ ¥3,200

ご注文

_____ PK

236105 フロアブルペースト



標準医院価格

¥4,000

特別標準医院価格

→ ¥3,200

ご注文

_____ PK

20%
OFF

エッチング・水洗不要のセルフエッチングプライマー

ご質問の多いエアブローのポイント

塗布

セルフエッチングプライマー



弱圧エアブロー

表層に浮いてきた水分のみを飛ばす




10秒放置

除去された水分

歯面処理完了

薄膜で強固なボンド層

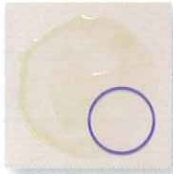

初回導入にはトライアルセットをおすすめしています！



2388

ビューティオーソ ボンドII トライアルセット

【内容】

ペースト(3g) 1、ペースト ビスコス(3g) 1、
フロアブルペースト(1.9g) 1、
フロアブルペースト ブルー(1.9g) 1、
セルフエッチングプライマー(3.0mL) 1、松風Vティッシュ 25枚、
ディスクブラシファイニエロー50本入、松風ニードルチップ25入

標準医院価格

¥20,000

特別標準医院価格

→ ¥16,000

ご注文

_____ PK

20%
OFF



エッチング
水洗

236101

セルフエッチングプライマー

標準医院価格

¥5,500

特別標準医院価格

→ ¥4,400

ご注文

_____ PK

20%
OFF

リン酸エッチング・水洗が不要なため、
チェアタイムの短縮に繋がります！

20%
OFF

その他単品製品も20%OFF！

製品	標準医院価格	特別標準医院価格	ご注文
236102 ペースト	¥4,500	¥3,600	PK
236103 ペースト ビスコス	¥4,500	¥3,600	PK
236104 プラスティックプラケットプライマー	¥5,500	¥4,400	PK

この案内に掲載の価格は全て税抜き価格になります。

製品詳細を知りたい方は松風ホームページの
カタログをご参照ください！(PDFが開きます)



管理医療機器 医療機器認証番号 226AFBZ00094000

ご注文はFAXにてお願い申し上げます。

FAX送信先：株式会社 松風 矯正課

03-3832-7682

お得意先名 フリガナ	ご担当者様 フリガナ
ご住所 フリガナ	TEL. - -
〒	FAX. - -

通信欄

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、商品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風 EST ビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
www.shofu.co.jp