


# EX クレーブ II

コンパクトなボディで給水から完了まで全自動  
14分のハイスピード滅菌

- 場所をとらないスリムな設計です。
- インstrumentやタービンハンドピースを高速で滅菌できます。
- 滅菌時間を任意に設定できます。

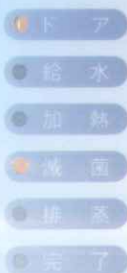

滅菌時間

83

min

速い

コンパクト

耐久性  
の向上




小型高圧蒸気滅菌器

## EX クレーブ II

高速滅菌機能により、  
効率的な器具の利用ができます。

## ■完了まで14分のハイスピード滅菌

給水→加熱→滅菌→自然冷却を約14分(135℃:3分)で滅菌処理  
でき、急な滅菌を必要とする場合にもすぐに対応できます。  
(水温が上昇している2回目以降は約10分で処理。)

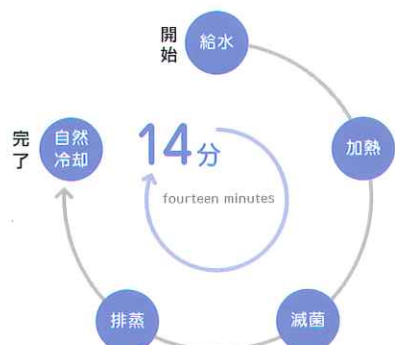

※室温20℃ 135℃コース選択時(被滅菌物の収容量により変わります)。  
※本製品には、乾燥工程はありませんが、完了後ドアが少し開き、  
5~10分程度で自然に乾燥します。

## ■滅菌温度・時間の設定が可能

使用目的に応じた滅菌温度を選択  
(121℃、135℃)出来ます。  
滅菌時間は135℃で3~60分、  
121℃では20~60分の範囲で  
任意に設定することが可能です。  
設定はパネル上のスイッチ  
で簡単に変更できます。



## ■オートチェック機構による滅菌

オートチェック機構では、ヒーターやモーター等に  
フィードバック回路を追加。誤作動の監視をはじめ、  
各機能をマイコンがチェックし、トラブルを速やかに  
発見・対応できます。



## ■オートドアロック機構で安全

オートドアロック機構は、自動でチャンバードアの  
開閉を行い、ドアがロックしたかをインジケータで  
確認することが出来ます。誤ったドア操作では開  
閉しない安全装置が付いています。



## ■使用水に合わせた2モード

水道水(給水自動設定の場合)、精製水(給水手動  
設定の場合)の2モードを選択することができます。



## ■場所をとらないスリムな設計

幅は182mm、奥行き363mmと  
小型なので設置場所をとりません。




## ■直径120mmの滅菌スペース

チャンバー容量はφ120×D200mmで、  
十分な滅菌スペースが確保できます。



【滅菌物組合せ例】


- タービンハンドピース 2本 ●コントラ 1本 ●ストレート 1本
- スルーウェイシリジノズル 2本
- バキュームチップ 1本(チップゴム1個)
- マイクロモーターカバー 1本 ●ミラー 1本
- ペリオプローブ 1本 ●エクスプローラー 1本 ●ピンセット 1本

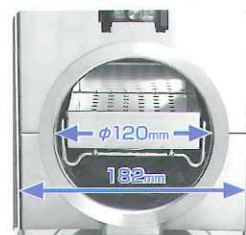

小型高圧蒸気滅菌器

## EX クレーブ II

- 仕様  
電源電圧: AC100V±10V 50/60Hz  
消費電力: 0.8kVA  
滅菌温度/時間: 121℃/20~60分 135℃/3~60分  
使用水: 水道水(給水自動設定の場合)  
精製水(給水手動設定の場合)  
外観寸法: W182×D363×H380mm(突起物を除く)  
チャンバー寸法: φ120×D200mm  
本体質量: 約14kg
- 付属品  
専用トレイ 1個(W102×D200×H30mm)、トレイ受け 1個  
トレイハンドル 1個、計量カップ 1個
- 標準価格 328,000円 107195
- 販売名: EXクレーブII
  - 一般的名称: 小型包装品用高圧蒸気滅菌器
  - 医療機器承認番号: 219AABZX00079000
  - 医療機器の分類: 管理医療機器(クラスII)  
特定保守管理医療機器

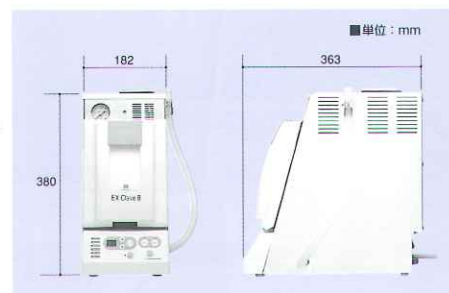

## 関連商品



歯科用ハンドピース  
メンテナンス装置  
ルブリナ

- 仕様  
電源: AC100-240V 50/60Hz  
消費電力: 18VA  
使用エア圧力: 0.3~0.5MPa  
推奨エア圧力: 0.5MPa  
エア流量: 40~60L/min  
外形寸法: W300×D300×H370mm  
質量: 約10kg
- 標準価格  
ルブリナ 230,000円 107475  
ルブリナ カップリング・スプレーホルダーなし  
185,200円 107494

※ハンドピースは商品に含まれておりません。

速くて確実、らくらく洗浄。メンテナンスはこれで安心。

ハンドピースをワンタッチでセットするだけで、1本25秒、4本100秒で自動的に  
注油・洗浄できるため、手作業によるバラツキや油で手が汚れることもありません。

タービンハンドピースのメンテナンス手順



EX クレーブ II と  
セットで使用すると  
より効果的な  
注油・洗浄、滅菌が  
できます。



●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2012年4月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造 株式会社湯山製作所  
製造販売 株式会社モリタ製作所  
京都市伏見区東浜南町680

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161  
[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

●この印刷物は環境にやさしい「植林木使用紙」「天然植物油大豆インク」を使用しています。

PUB No.M207866-5-000.1205.3,000II-SU-Z